

## **PROCEDIMENTOS PARA USO DO ULTRASSOM**

### **LIGANDO O EQUIPAMENTO**

1. Ajustar travas do equipamento (ao lado das rodinhas);




2. Ligar na tomada;



3. Abrir o ultrassom: levar as duas travas da frente do equipamento para os lados simultaneamente e levantar o monitor;





4. Ligar o equipamento no botão *Power* (verde na lateral esquerda do equipamento).

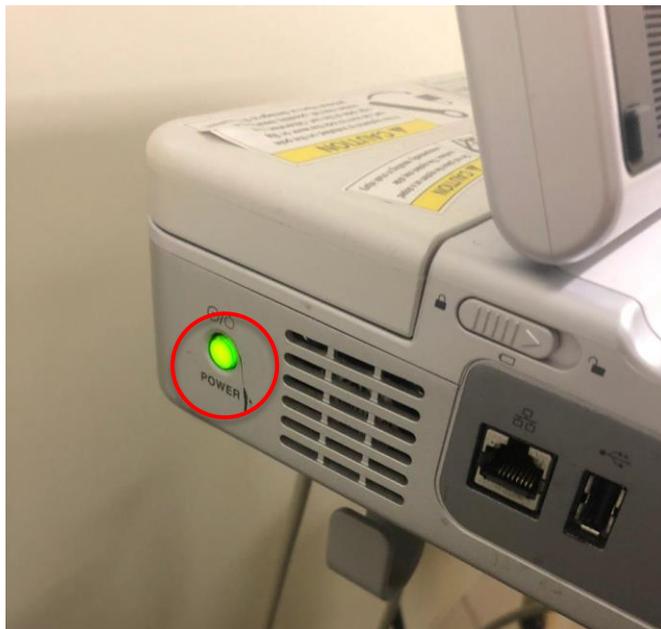


## AVALIAÇÃO COM O INDIVÍDUO


1. Cadastrar nova avaliação clicando nos bonequinhos no canto superior esquerdo da tela e entrar na função *Scheduled*;

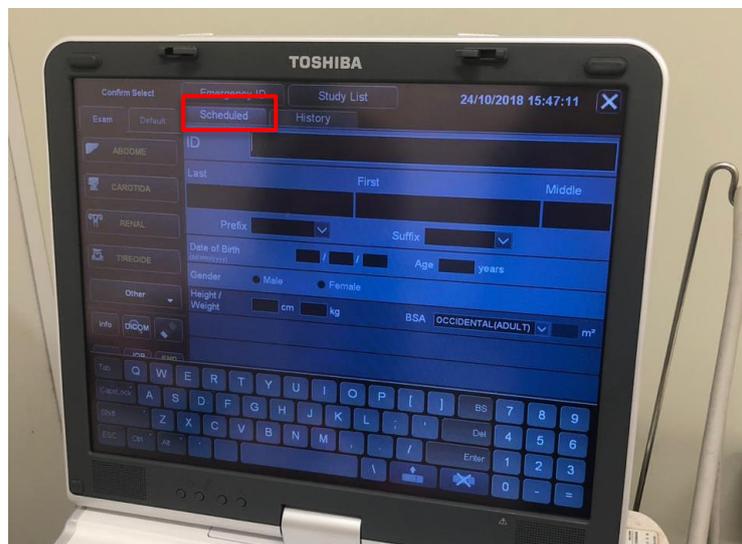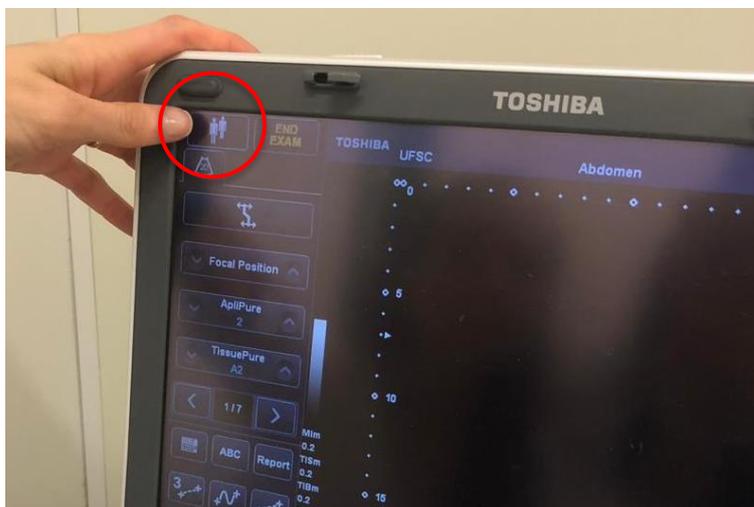


2. Para digitação dos dados do paciente, clicar no teclado na tela e depois clicar no teclado com um "x" para ocultá-lo;

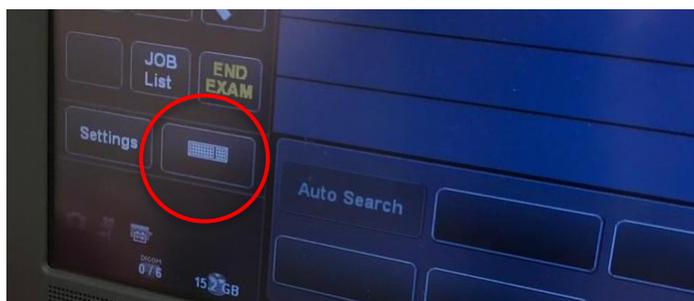

3. Preencher *ID*, *Last Name*, *First Name*, *Date of Birth*, *Gender*, *Height*, *Weight* e *BSA* do avaliado. OBS: Os dados do paciente são salvos automaticamente;

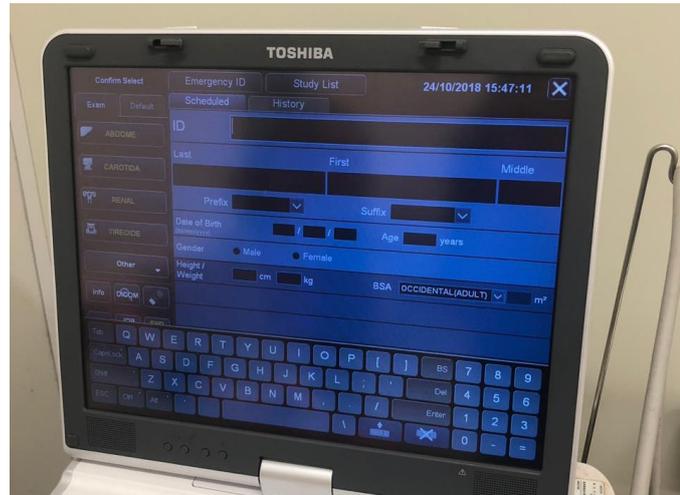

4. Escolher em *Exam*, *Default* ou *Other* a parte do corpo desejada para a medição;

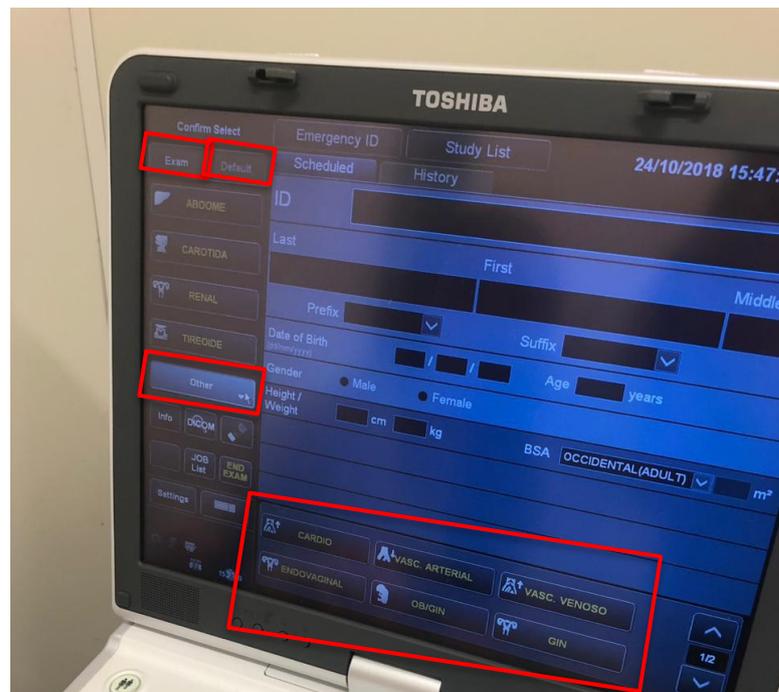

5. Pedir para o avaliado deitar na maca de forma que fique melhor para a realização do exame;
6. Iniciar a avaliação. Pegar o transdutor ao lado direito do equipamento, estará envolto em uma flanela ou lenço de papel;




7. Passar o gel condutor no transdutor (como mostra na imagem);



8. Espalhar o gel com o transdutor na área do corpo onde está sendo feita a medida;  
9. É possível dar zoom a imagem que aparece na tela ajustando no botão *DEPTH ZOOM*;




10. Para tirar e gravar foto da tela, usar o botão *FRZ* para congelar imagem, a trackball para escolher a melhor imagem captada e o botão *STILL STORE* para gravar;

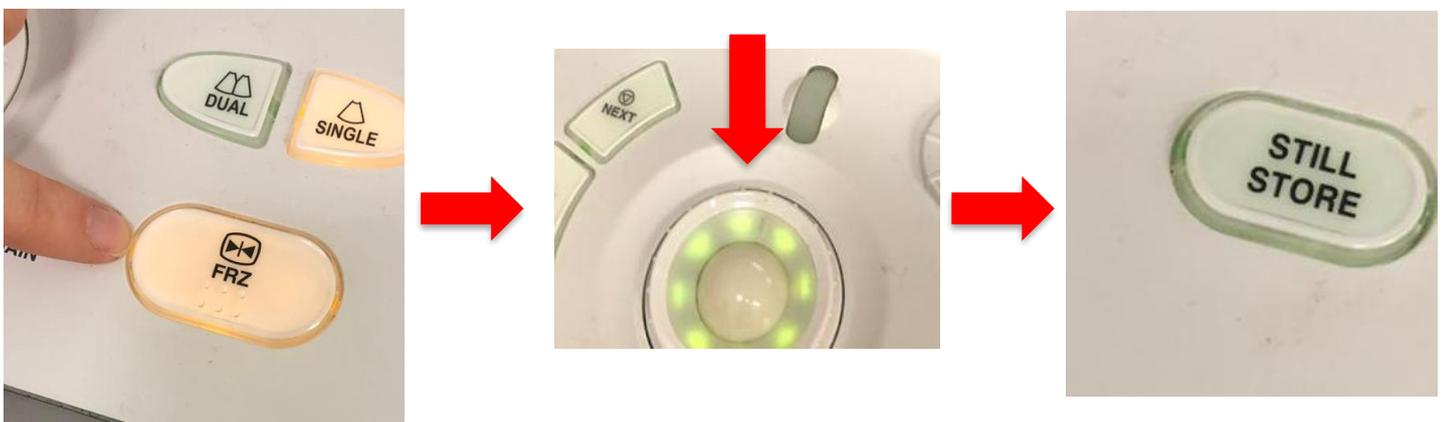


11. Para inserir comentários na imagem clicar em *ABC* para entrar e sair da função;




12. Para finalizar clicar em *END EXAM*;

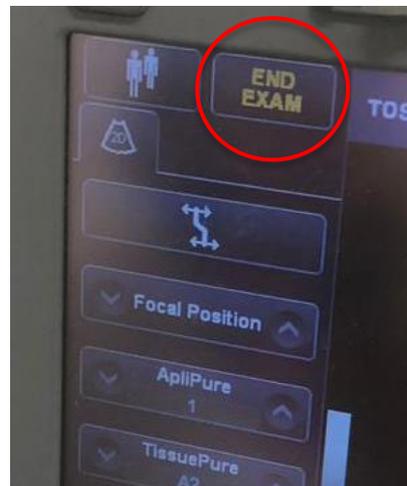

13. Vai pedir para confirmar se quer mesmo finalizar o exame, clicar em *OK*;

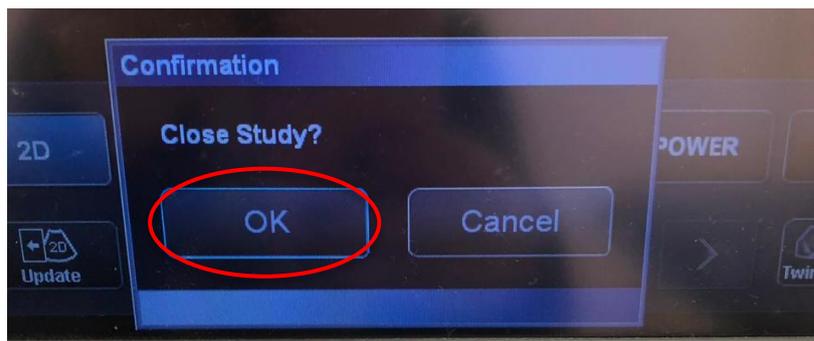


14. Para iniciar um novo exame, clicar nos bonequinhos e começar o passo a passo novamente.

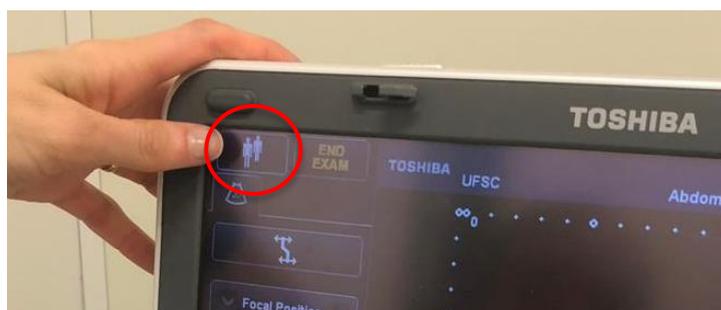


## ACESSANDO DADOS ARQUIVADOS NO EQUIPAMENTO E SALVANDO DADOS EM USB


1. Clicar no ícone ao lado do ABC;

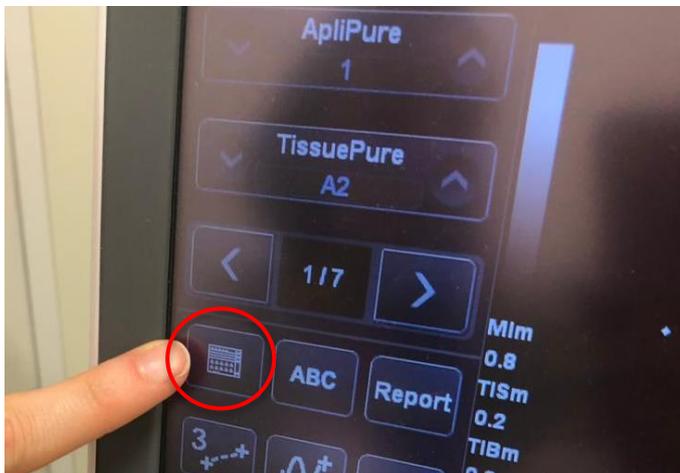


2. Clicar em *All List*;

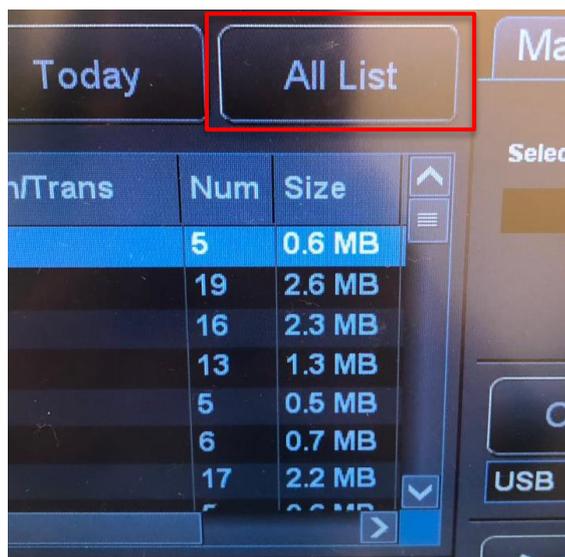

3. Procurar os pacientes pelo ID, nome, etc;

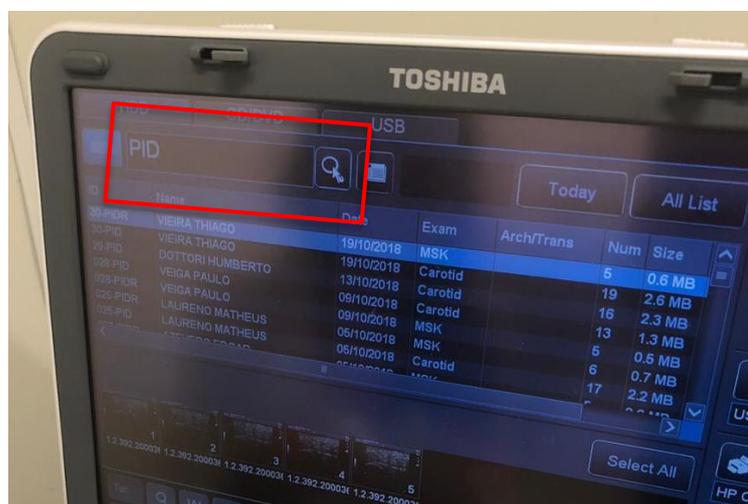


4. Clicar em cima do exame para ver as fotos salvas;

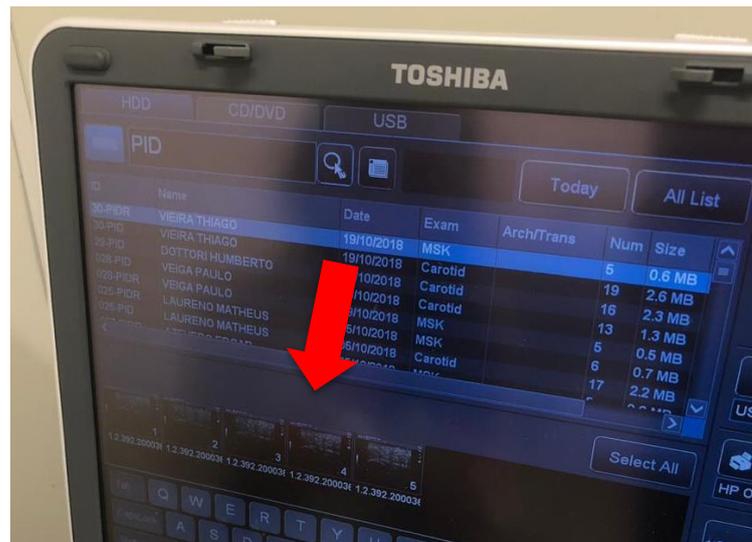

5. Se for do seu interesse salvar as fotos em um dispositivo USB, inseri-lo na entrada USB na lateral esquerda do equipamento e clicar em *Convert* (lado direito da tela);



6. Escolher o formato e clicar em *OK*;

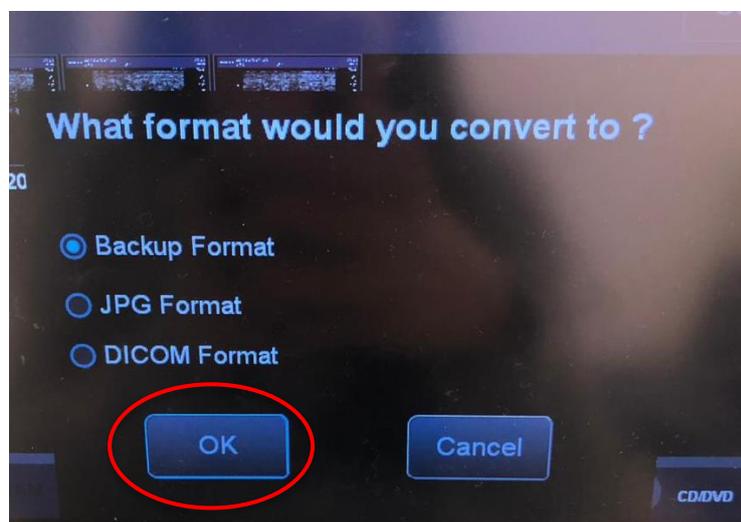

7. Clicar no X no canto superior direito da tela para sair.



## DESLIGANDO O EQUIPAMENTO



1. Limpar o transdutor com um papel dando pequenas batidinhas em cima e depois com a flanela normalmente;



2. Enrolar a flanela ou lenço de papel no transdutor para guardar e apoiar o fio do transdutor no suporte de metal ao lado do equipamento;



3. Clicar no botão lateral *Power* para desligar e selecionar a opção *Shutdown* que aparece na tela;

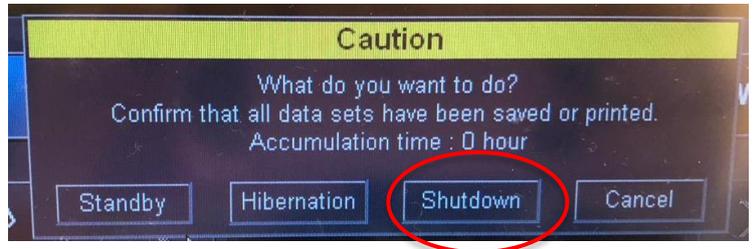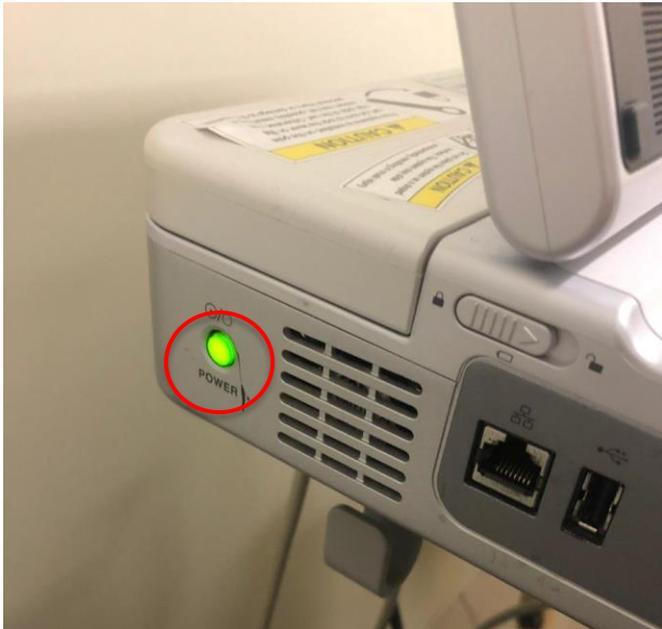

4. Desligar da tomada quando a tela ficar preta.